



[PRODUCATOR]

- lavoare aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor
- lavoare tehnice producere apa sterila spalare / clatire instrumental medical
- mobilier medical din inox

[IMPORTATOR]

- consumabile certificate pentru lavoare chirurgicale si lavoare tehnice producere apa sterila



[MEDISAR 1 TP L]

capsula microfiltrare tip dus pentru producere apa sterila

Capsula de filtrare finala pentru producere apa sterila, neautoclavabila, cu durata de viata de **35 zile**

Aceasta capsula de apa sterila TIP JET este conceputa pentru a fi montata direct pe bateria sanitara conectata la un sistem profesional de prefiltrare mecanica in trepte. Lavoarele aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor model MEDIASEPT si lavoarele tehnice producere apa sterila model MEDISAFE produse de IQ WATER MEDICAL detin o tehnologie de prefiltrare mecanica extrem de eficienta, in 5-6 trepte, a apei de retea, cu filtre profesionale, antibacteriene, asigurand astfel ca apa care ajunge in capsula de apa sterila tip dus este filtrata mecanic de particule in suspensie de pana la 1 micron (filtrare non



Putem garanta astfel durata de exploatare a capsulei MEDISAR 1 TP L de 35 de zile (*specificatiile producatorului*) daca sunt respectate urmatoarele conditii (obligatorii):

- Inlocuirea filtrelor la intervalul de timp recomandat de IQ WATER MEDICAL - 4-6 luni;
- Respectarea cu strictete a conditiilor de igiena in incaperea unde este montata capsula;
- Sa nu se atinga sub nici o forma punctul de curgere al apei din capsula de apa sterila tip dus;
- Sa se efectueze dezinfectie locala prin pulverizare a suprafetei capsulei cu un dezinfectant puternic la un unghi de inclinatie de 45 de grade, inainte si dupa utilizarea capsulei;
- Sa se efectueze zilnic sau de cate ori este nevoie dezinfectarea lavoarului chirurgical / lavoarului tehnic.



cupla rapida

Important!

Aceasta capsula tip JET nu se autoclaveaza! Dupa 35 de zile se inlocuieste cu o alta noua! Este obligatorie prefiltrarea apei de retea cu un sistem profesional de filtrare mecanica in trepte, iar in cazul in care presiunea apei este mai mare de 5 bar - montarea pe retea de apa a unui regulator de presiune. Intrebati specialistii IQ WATER MEDICAL!



Diamterul porilor » 0,15 μ
Aria de filtrare » 1 m²
Temp. max. de lucru » 60°C
Presiune min/max de lucru » 2,5/5 bar
Debit (la 3 bar) » 15l / min



ATENTIE!

» Se recomanda testarea apei inaintea montarii Capsulei de apa sterila tip dus MEDISAR 1 TP L pentru spalarea chirurgicala a mainilor!





[PRODUCATOR]

- lavoare aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor
- lavoare tehnice producere apa sterila spalare / clatire instrumental medical
- mobilier medical din inox

[IMPORTATOR]

- consumabile certificate pentru lavoare chirurgicale si lavoare tehnice producere apa sterila



[MEDISAR 3 TP L]

capsula microfiltrare tip dus pentru producere apa sterila

Capsula de filtrare finala pentru producere apa sterila, neautoclavabila, cu durata de viata de **92 zile**

Aceasta capsula de apa sterila TIP JET este conceputa pentru a fi montata direct pe bateria sanitara conectata la un sistem profesional de prefiltrare mecanica in trepte. Lavoarele aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor model MEDIASEPT si lavoarele tehnice producere apa sterila model MEDISAFE produse de IQ WATER MEDICAL detin o tehnologie de prefiltrare mecanica extrem de eficienta, in 5-6 trepte, a apei de retea, cu filtre profesionale, antibacteriene, asigurand astfel ca apa care ajunge in capsula de apa sterila tip dus este filtrata mecanic de particule in suspensie de pana la 1 micron (filtrare non



Putem garanta astfel durata de exploatare a capsulei MEDISAR 3 TP L de 92 de zile (*specificatiile producatorului*) daca sunt respectate urmatoarele conditii (obligatorii):

- Inlocuirea filtrelor la intervalul de timp recomandat de IQ WATER MEDICAL - 4-6 luni;
- Respectarea cu strictete a conditiilor de igiena in incaperea unde este montata capsula;
- Sa nu se atinga sub nici o forma punctul de curgere al apei din capsula de apa sterila tip dus;
- Sa se efectueze dezinfectie locala prin pulverizare a suprafetei capsulei cu un dezinfectant puternic la un unghi de inclinatie de 45 de grade, inainte si dupa utilizarea capsulei;
- Sa se efectueze zilnic sau de cate ori este nevoie dezinfectarea lavoarului chirurgical / lavoarului tehnic.



cupla rapida

Important!

Aceasta capsula tip JET nu se autoclaveaza! Dupa 92 de zile se inlocuieste cu o alta noua! Este obligatorie prefiltrarea apei de retea cu un sistem profesional de filtrare mecanica in trepte, iar in cazul in care presiunea apei este mai mare de 5 bar - montarea pe retea de apa a unui regulator de presiune. Intrebati specialistii IQ WATER MEDICAL!



Diamterul porilor » 0,15 μ
Aria de filtrare » 1 m²
Temp. max. de lucru » 60°C
Presiune min/max de lucru » 2,5/5 bar
Debit (la 3 bar) » 15l / min



ATENTIE!

» Se recomanda testarea apei inaintea montarii Capsulei de apa sterila tip dus MEDISAR 3 TP L pentru spalarea chirurgicala a mainilor!

